

QUICKSEPT PUR

ALKOHOLISCHE SCHNELLEDÉSINFEKTION



Artikelnummer 345371 500ml | 345372 1L | 345373 5L

EAN-Nummer 4064791015397 | 4064791015410 | 4064791015434

Beschreibung Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art

Anwendungsgebiete Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet..

Anwendung Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Nur zur professionellen Anwendung. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen.

Wischapplikation:

Die zu desinfizierenden, alkoholbeständigen Flächen vollständig abwischen. Auf vollständige Benetzung der Oberfläche während der gesamten Einwirkzeit achten.

Sprühapplikation:

Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Bei 5L Gebinden: Einsatz im Vliestuchspendersystem: Quicksept Pur eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 42 Tagen in Kombination mit den Wipes

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polyethylenterephthalat (PET).

Die Kompatibilität mit Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Kunststoffen kann je nach Materialtyp variieren. Die Materialverträglichkeit vorab an einer kleinen unauffälligen Stelle testen.)

Produktdaten Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH. DVG-gelistet.

Registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

gem.Biozidgesetz: BAuA Reg. - Nr. N-117477

QUICKSEPT PUR



Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten: 45,0 g Ethanol

Wirkungsspektrum

Anwendungsempfehlung zur Flächenwischdesinfektion (unverdünnt, geprüft bei 20°C, hohe und niedrige Belastung):

bakterizid, levurozid (EN 13727, EN 13624, EN 16615):	5 Minuten
mykobakterizid (EN 14348, M.avium und M.terrae):	5 Minuten
begrenzt viruzid (EN 14476):	1 Minute
begrenzt viruzid PLUS (EN 14476):	5 Minuten

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion ohne mechanische Wirkung (unverdünnt, geprüft bei 20°C, hohe und niedrige Belastung):

bakterizid, levurozid (EN 13727, EN 13624, EN 17387):	5 Minuten
mykobakterizid (EN 14348) (M. avium und M. terrae):	5 Minuten
begrenzt viruzid (EN 14476, EN 16777):	1 Minute
begrenzt viruzid PLUS (EN 14476 , EN 16777):	5 Minuten

Ergänzende Prüfergebnisse

(unverdünnt, geprüft bei 17°C - 26°C, hohe Belastung, EN 16777):

Inaktivierung Noro-Viren (MNV):	5 Minuten
Inaktivierung Adeno-Viren:	5 Minuten

Warnhinweise

Achtung Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Transport und Lagerung

Verlader haben die Pflicht, die Gefahren einer Ware zu ermitteln, die Sie beabsichtigen zu transportieren.

Hersteller

Dr. Schumacher GmbH | Am Roggenfeld 3 | 34323 Malsfeld |
T +49 5664 9496-0

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.