

# QUICKSEPT A

## ALKOHOLISCHE SCHNELLEDISENFECTIION



**Artikelnummer** 285694 1 L | 285695 5 L

**EAN-Nummer** 4260096563933 | 4260096563940

**Beschreibung** Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion

**Anwendungsgebiete** Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf Ethanolbasis zur wirksamen und schnellen Deinfektion von nicht-invasiven medizinischen Geräten und alkoholresistenten Oberflächen aller Art. Umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und alle Viren (viruzid gegen behüllte und unbehüllte Viren). Quicksept A ist für alle wasserbeständigen Oberflächen geeignet, auch in lebensmittelverarbeitenden Bereichen und in Großküchen anwendbar.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet. Erfüllt die Vorgaben aus dem europäischen Lebensmittelrecht (HACCP).

**Anwendung** Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit, jedoch mindestens 30 Sekunden, feucht halten. Kein Nachwischen erforderlich.

**Produktdaten** Registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: BAuA Reg. - Nr.N-100110.

UFI-Code: QDKK-PJQC-M00H-W790

**Inhaltsstoffe** 100g Lösung enthalten: Ethanol 57g, Isopropanol 6g

**Wirkungsspektrum** Gebrauchsfertige Lösung, nicht verdünnen.

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bakterizid, levurozid:                    | 30 Sekunden |
| Mykobakterizid (M. terrae und M. avium) : | 30 Sekunden |
| Viren (Vacchinia, HIV, HBV, HCV, Noro)    | 15 Sekunden |
| Adenoviren                                | 30 Sekunden |
| Polioviren                                | 2 Minuten   |
| Schimmelpilze                             | 2 Minuten   |

Prüfungen: EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563

**Gegenanzeigen und Nebenwirkungen**

**Dosierung**

## QUICKSEPT A

### ALKOHOLISCHE SCHNELLDESINFEKTION

**Warnhinweise**

Verursacht schwere Augenreizung. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/ Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

**GEFAHR****Transport und Lagerung**

Verlader haben die Pflicht, die Gefahren einer Ware zu ermitteln, die Sie beabsichtigen zu transportieren.

**Hersteller**

mobiloclean Handelsgruppe GmbH & Co.KG, Bredentiner Weg 4a,  
18273 Güstrow, T +49 89 33 03 7479 10

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**